

当案内及び過去に発行した案内は弊社ウェブサイト(<https://www.medience.co.jp/>)よりPDF形式にてダウンロードできます。

## 新規受託項目のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さてこのたび、下記項目の検査受託を開始することとなりましたのでご案内いたします。

弊社では皆様のご要望にお応えすべく、今後とも検査の新規拡大に努めてまいります。

敬具

記

### 新規受託項目

- [12589] 消化管マルチスクリーニング

### 受託開始日

- 2022年6月1日(水)



# 消化管マルチスクリーニング

本検査は体外診断用医薬品を用いて、鑑別の難しい消化管感染症の13種の細菌、4種の寄生虫、5種のウイルスの核酸を迅速かつ一度に検出します。検査の所要日数が短く、早期の治療方針決定に有用です。

## [検出可能な病原体]

| 細菌 | 寄生虫 | 検出可能な病原体 |
|----|-----|----------|
|    |     | 検出可能な病原体 |

| 細菌   | 寄生虫        | ウイルス            |
|--|------------|-----------------|
| カンピロバクター                                     | クリプトスポリジウム |                 |
| クロストリジオイデス・ディフィシル toxin A/B                  | サイクロスポラ    |                 |
| プレジオモナス・シゲロイデス                               | アメーバ赤痢     |                 |
| サルモネラ菌                                       | ランブル鞭毛虫    |                 |
| ビブリオ属  |            | アデノウイルス F 40/41 |
| コレラ菌   |            | アストロウイルス        |
| エルシニア・エンテロコリチカ                               |            | ノロウイルス GI/GII   |
| 腸管凝集性大腸菌 (EAEC)                              |            | ロタウイルス A        |
| 腸管病原性大腸菌 (EPEC)                              |            | サポウイルス          |
| 毒素原性大腸菌 (ETEC) <i>lt/st</i>                  |            |                 |
| 腸管出血性大腸菌 (志賀毒素産生大腸菌 : STEC) <i>stx1/stx2</i> |            |                 |
| <i>E. coli</i> (O157)                        |            |                 |
| 腸管侵入性大腸菌 (EIEC)                              |            |                 |

## 検査要項

|          |  |
|----------|--|
| 項目コード    | 12589  |
| 検査項目名    | 消化管マルチスクリーニング                                    |
| 検体量/保存方法 | 糞便 1g [容器番号：38番] / 冷蔵 (凍結不可)                     |
| 検査方法     | マイクロアレイ法   |
| 基準値      | 検出せず   |
| 報告様式     | [検出可能な病原体] それぞれについて、<br>検出せず/陽性/判定不能/省略にてご報告します。 |
| 所要日数     | 2~3日   |
| 検査実施料    | 未収載  |

## 消化管マルチスクリーニングの判定について

### 腸管病原性大腸菌 (EPEC) の判定について

・腸管出血性大腸菌 (STEC) が「陽性」と判定された場合、EPECは「省略」でご報告します。

### *E. coli* (O157) の判定について

- ・STECが同時検出された場合にのみ、*E. coli* (O157) は「陽性」または「検出せず」でご報告します。
- ・STECが「検出せず」の場合、*E. coli* (O157) は「省略」でご報告します。