

特異的IgE測定試薬

イムファストチェックJ1

特異的IgE測定試薬(ヤケヒョウヒダニ/スギ花粉/ネコ上皮)

イムファストチェックJ2

特異的IgE測定試薬(卵白/牛乳/小麦)




その場で結果が分かる アレルギー検査



20 μ L

採血はごく**微量**でOK

患者さんも安心!
指先から微量採血。(全血20 μ L)

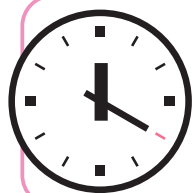

Fast

測定時間わずか**20分**

測定結果を踏まえた患者さんへの即日指導が可能。
同時に3項目の各アレルゲンクラスを測定。



Easy


機器不要のカンタン操作

反応カセットに検体処理液・検体の混合液と、付属の展開液を滴下するだけ! その他の機器は不要。

幅広い診療科でご利用いただいております。小児科 内科 耳鼻咽喉科 皮膚科 眼科 など



操作法

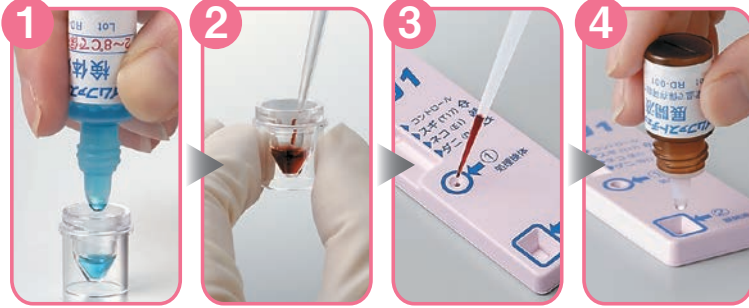

1 検体処理液2滴をサンプルカップに滴下

2 検体20μL*を加えて、均一に混合
*検体:全血、血漿または血清

3 混合液の20μLを反応カセットの処理検体滴下部①に滴下

4 展開液5滴を反応カセットの展開液滴下部②に滴下し、水平に静置

判定



20分静置後、判定用色見本と合わせて、クラス判定。患者さんへの即日指導が可能です。(感度:クラス2)

他法との相関

※他法:特異的IgE(シングルアレルゲン)

イムファストチェック J1

ヤケヒョウヒダニ (クラス)

本品(全血)	4			4	7	2	5
3			20	3			
2	1	13	5				
0/1	77	3	1				
	0	1	2	3	4	5	6

他法* (血清)

スギ花粉 (クラス)

本品(全血)	4			2	8	2	
3			1	15	10		
2	1	23	15				
0/1	56	5	3				
	0	1	2	3	4	5	6

他法* (血清)

ネコ上皮 (クラス)

本品(全血)	4				4		
3				7			
2	4	6	1				
0/1	109	7	3				
	0	1	2	3	4	5	6

他法* (血清)

イムファストチェック J2

卵白 (クラス)

本品(全血)	4				3	2	5
3			5	5	2		
2	1	5	1				
0/1	102	7	1				
	0	1	2	3	4	5	6

他法* (血清)

牛乳 (クラス)

本品(全血)	4			2	2	4	3
3				3			
2	1		1	2			
0/1	107	15	1				
	0	1	2	3	4	5	6

他法* (血清)

小麦 (クラス)

本品(全血)	4				2	1	2
3				1	5	2	1
2			12	8	1		
0/1	97	5	3				
	0	1	2	3	4	5	6

他法* (血清)

製品構成



※写真はイムファストチェックJ1の内容です。

■ イムファストチェック J1 (体外診断用医薬品)

認証番号 220AHAMX00009000
貯法: 2~8℃保存

■ イムファストチェック J2 (体外診断用医薬品)

認証番号 220AHAMX00010000
貯法: 2~8℃保存

10検体用

内容 反応カセット(10枚)、検体処理液(1本)、展開液(1本)、判定用色見本(1枚)、ミニピペット用チップ(10本)、検体処理用サンプルカップ(10個)、判定結果シート(1冊)

採血器具は付属しておりません。
測定操作には20μL用のピペットを使用いたします。



別売品

ミニピペット

内容

- ・20μL用(キット付属チップ専用ピペット)
- ・1本で繰り返しご使用いただけます。
- ・採血器具ではありません。

微量採血をされる場合には、ヘパリン処理ヘマトクリット管(内径1.1mm以上)、ランセットを別途ご用意ください。

製造販売元



株式会社LSIメディエンス

(本社) 〒101-8517 東京都千代田区内神田一丁目13番4号
お問い合わせ先 インフォメーション TEL.03-5994-2516(平日 9:00~17:45)
URL <http://www.medience.co.jp/>

2D1704JBA-08 2017年4月作成