



イムファストチェック J1

特異的IgE測定試薬(ヤケヒョウヒダニ/スギ花粉/ネコ上皮)

体外診断用医薬品
認証番号 220AHAMX00009000



イムファストチェック J2

特異的IgE測定試薬(卵白/牛乳/小麦)

体外診断用医薬品
認証番号 220AHAMX00010000

操作法

キット構成



①判定用色見本 ②反応カセット ③検体処理液 ④展開液 ⑤検体処理用サンプルカップ ⑥ミニピペット用チップ ⑦判定結果シート

別売品



ミニピペット(20 μ L用)
*ミニピペット添付の説明書をご覧の上、ご使用ください。
(1本で繰り返し使用できます)

検体の採取

採血器具にはヘパリンまたはEDTAの抗凝固剤処理されたものをご使用ください。採血器具はキットに付属しておりません。微量採血の場合は、ヘマトクリット管、ランセットを、静脈採血の場合は、真空採血管を別途ご用意ください。

注意事項

構成試薬は2~8 $^{\circ}$ Cで保管し、ご使用前に室内温度(20~37 $^{\circ}$ C)に戻してください。特に「反応カセット」は室内温度に戻ったことを確認後アルミパックの開封をしてください。

操作法



① 検体処理液(青)をサンプルカップに2滴入れます。
(垂直に立てて滴下してください)



② 上記方法で採取した検体から、20 μ L(ワンプッシュ分)をミニピペットで取ります。



③ サンプルカップ中の検体処理液(①)に検体を入れます。



④ ミニピペットで10回以上出し入れを行い完全に均一になるまで混合します。



⑤ ④の処理検体20 μ L(ワンプッシュ分)をミニピペットで取り、反応カセット①(処理検体)の凹みに滴下します。
*処理検体が吸い込まれない場合は、指で数回軽くたたいてください。



⑥ 処理検体が判定窓に進んだことを確認し、展開液(茶ピン)を直ちに(1分以内)反応カセット②(展開液)の凹みに5滴滴下します。水平のまま静置し、展開液滴下から20分待ちます。



株式会社LSIメディエンス

判定

→
(裏面をご覧ください)