


判定

展開液滴下直後



静置 20分
(正確に)

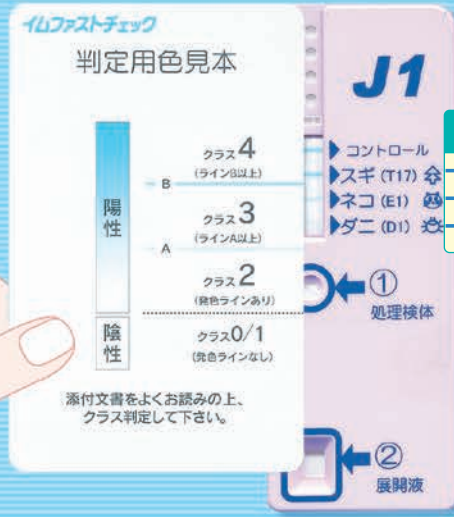


判定例	
→ クラス 4	→ クラス 4
→ クラス 3	→ クラス 3
→ クラス 2	→ クラス 2

判定用色見本の右端をなるべく反応カセットに近づけてご覧ください。アレルゲンラインとして青い発色が認められればクラス2以上、色調がラインAより濃ければクラス3以上、ラインBより濃ければクラス4以上と判定します。







以下の写真は判定部の発色例です。実際の判定に際しましてはあらかじめ添付文書の操作方法をご確認ください。

陰性例

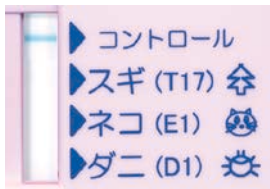


コントロールにのみ、青色の発色ラインが認められた場合


陽性例

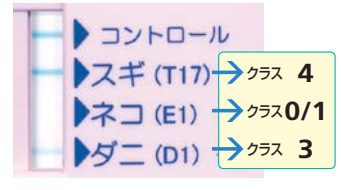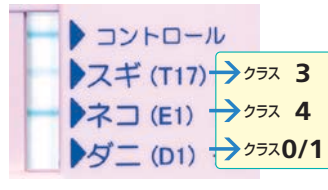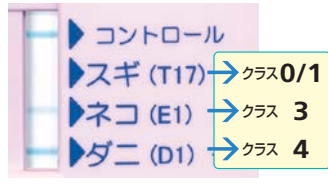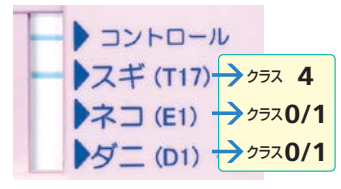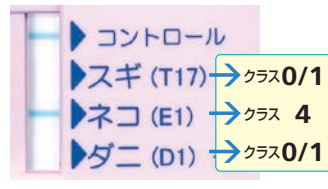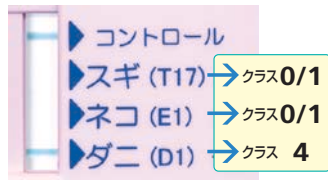


判定可能例

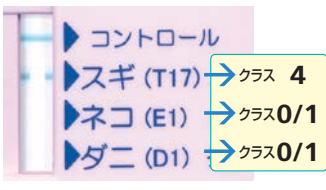


発色ラインが欠けた場合

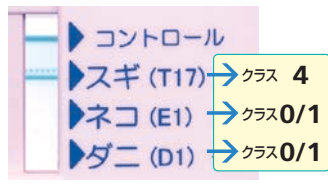

発色ライン以外に点状の発色が生じた場合

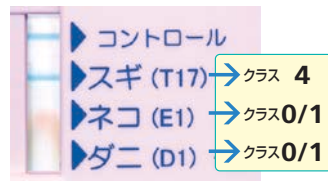


青色の発色ライン以外に、スポット等が残っている場合

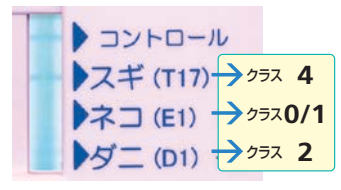


青色のバックグラウンドが残っている場合

*発色ライン内で発色の濃淡がある場合は、最も濃い部分で判断してください。


再検査が必要な例

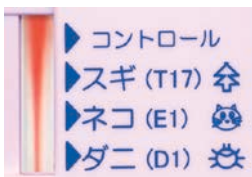


検体(血液)と検体処理液の混合が不十分だった場合等

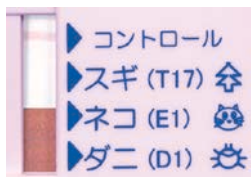


展開液が滴下されなかった場合

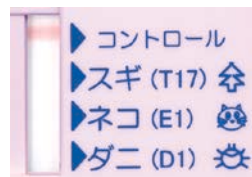

処理検体が滴下されなかった場合等

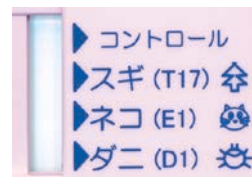

展開液滴下を処理検体滴下よりも先に行った場合等

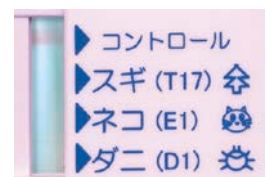

処理検体の滴下位置を誤った場合等

*コントロールラインが青く発色しない場合は、操作手順をご確認のうえ新しい反応カセットで再検査を行ってください。

製造販売元

株式会社LSIメディエンス

(本社) 〒101-8517 東京都千代田区内神田一丁目13番4号
お問い合わせ先 インフォメーション TEL.03-5994-2516(平日 9:00~17:45)
URL <http://www.medience.co.jp/>